

Atomic70[®]

Producto destinado al sector de salud

Mayor eficiencia en el control microbiológico.

Desinfectante de alto nivel



CINTA MEDIDORA DE PRUEBA



Dioxide

Desenvolvendo Química Sustentável

Finalidade de uso

Desinfección de:

- Artículos semicríticos (endoscopios, transductor vaginal y otros);
- Artículos de nivel intermedio (material de terapia de inhalación, asistencia ventilatoria y otros);
- Artículos no críticos (cuñas y otros tipos de orinales);
- Superficies fijas (bancadas, camillas, pisos, paredes, vidrios, acrílicos y otros);
- Pantallas táctiles, metales y otros;
- Zonas críticas (centros quirúrgicos, UCI, hemodiálisis, bancos de sangre y otros);
- Zonas semicríticas (enfermerías, ambulatorios y otros);
- Zonas no críticas (sector administrativo, superficies en general, lavabos y otros);
- Áreas de higiene hospitalaria;
- Área de nutrición y dietética;
- Clínicas especializadas (oftalmología, ginecología, hemodiálisis, etc.);
- Clínicas de odontología;
- Ambulancias;
- Laboratorios de análisis clínicos y patológicos;
- Morgues;
- Entre otros.

Modo de uso

Durante el manejo del producto, recomendamos el EPP adecuado, como guantes, máscara, gafas protectoras, delantal o bata.

- Agregar 5 ml del producto Atomic70 por cada 1 litro de agua.
- Tiempo de Contacto: 15 minutos.
- La solución puede ser reutilizada durante 24 horas;
- La concentración de la solución es demostrada mediante el uso de cintas medidoras.

Ventajas del uso

- No corrosivo*;
- No tóxico*;
- No es necesario desmineralizar el agua;
- No necesita enjuague (excepto en artículos semicríticos);
- Producto no perjudicial para el medio ambiente;
- Elimina el Biofilme;
- Contiene tensioactivos;
- Mejor costo-beneficio;
- El desecho puede ser realizado directamente en la red, sin necesidad de neutralizar.

*Con la dosis y el tiempo de contacto recomendados

Efectivo contra varios microorganismos:

- | | |
|--|--|
| • Staphylococcus aureus | • Clostridium difficile |
| • Salmonella choleraesuis | • Helicobacter pylori |
| • Escherichia coli | • Candida Auris |
| • Pseudomonas aeruginosa | • Virus Vaccinia Ankara modificado |
| • Trichophyton mentagrophytes | • Virus de Hepatitis B |
| • Candida albicans | • Virus de Hepatitis C |
| • Mycobacterium smegmatis | • Filoviridae (Ébola) |
| • Mycobacterium massiliense | • Flavivirus (Chikungunya; Dengue) |
| • Mycobacterium bovis | • Virus de la Inmunodeficiencia Humana |
| • Enterococcus faecium VRE (Resistente a la Vancomicina) | • Herpesviridae |
| • Bacillus subtilis | • Virus de Leucemia Celular humana - HTLV-1-Retrovirus |
| • Clostridium sporogenes | • Zika virus |
| • Acinetobacter baumannii | • Virus Influenza |
| • Klebsiella pneumoniae carbapenemasa | • Coronavirus |
| • Enterococcus faecalis | • Paramyxoviridae (Sarampión) |
| | • Virus de la Rubéola |



Dioxide

Desenvolviendo Química Sustentável

REGISTRO ANVISA | M.S nº 362940002
Autorización de Funcionamiento en el M. S.: 3.06.294-0

Responsable Técnico:
Alba Harumi Nishimura Saziki - CRQ/SP 04405740

DIOXIDE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.
Avenida Vitória Rossi Martini, 641
Distrito Industrial Vitória Martini
Indaial/SC - C.P.: 13347-613
Serviço de Atendimento ao Cliente:
+55 19 3936-1501 - www.atomic70.com.br

En caso de emergencia llame al
Centro de Ayuda Toxicológica (CEATOX): 0800 014 8110