

Atomic

Desinfectante Estabilizado **READY**

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN AMBIENTES DE ATENCIÓN MÉDICA

2 en 1 Detergente y Desinfectante

para superficies fijas y
artículos no críticos.



Modelo pulverizador con 750ml

EFICACIA COMPROBADA EN

2 min

Eficacia comprobada en 2 minutos para:

- ✓ Escherichia Coli
- ✓ Enterococcus Hirae
- ✓ Staphylococcus Aureus
- ✓ Salmonella Choleraesuis
- ✓ Pseudomonas Aeruginosas

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE ATOMIC READY?



LISTO PARA USAR



ACCIÓN RÁPIDA



BIODEGRADABLE



ECONÓMICO

Características

- ✓ pH NEUTRO
- ✓ SIN ALCOHOL
- ✓ CON BIGUANIDA POLIMÉRICA
- ✓ TENSIOACTIVO NO IÓNICO
- ✓ CUATERNARIO DE AMONÍACO DE 5ª GENERACIÓN
- ✓ SIN ENJUAGUE
- ✓ SIN COLORANTES
- ✓ SIN PERFUME
- ✓ NO CORROSIVO
- ✓ NO INFLAMABLE

Atomic Ready es indicado para:



Hospitales



Centros quirúrgicos




Clínicas de especialidades



Artículos no críticos



Ambulancias

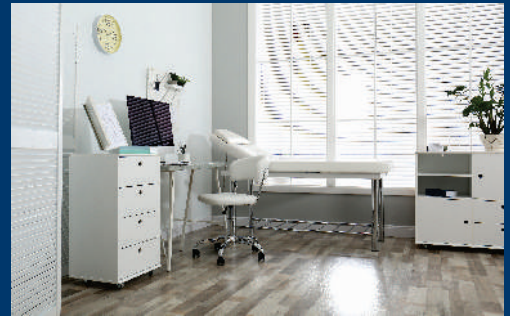

Ambulatorio



Modo de uso

Para la limpieza y desinfección de superficies fijas, aplique **Atomic Ready** directamente sobre la superficie con ayuda de spray, pulverizador o un paño limpio humedecido con el producto. Para la limpieza y desinfección de artículos no críticos, lave con **Atomic Ready**, deje actuar durante 2 minutos, enjuague y seque los artículos.

*Utilice guantes durante el manejo del producto.

PRODUCTO FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR INDUSTRIA BRASILEÑA: DIOXIDE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.
IND. BRASILEÑA / REGISTRO ANVISA | M.S. nº 362940005 | SAC (19) 3936-1501