

# 2 en 1 Detergente y Desinfectante

para superficies fijas  
y artículos no críticos

Biguanida polimérica y  
Cuaternario de Amoníaco  
5ª generación

Bombona Modelo 5L



Pulverizador Modelo 750mL



**LISTO PARA USAR**



**ACCIÓN RÁPIDA**



**BIODEGRADABLE**



**ECONÓMICO**

EFICACIA COMPROBADA EN

# 2 min

- **Superhongos:**
  - Candida auris
- **Bacterias Gram-negativas:**
  - Escherichia coli
  - Salmonella choleraesuis
  - Pseudomonas aeruginosa
- **Bacterias Gram-positivas:**
  - Enterococcus hirae
  - Staphylococcus aureus
  - Staphylococcus aureus MRSA
  - Enterococcus faecalis VRE

## Características:

- pH neutro;
- Sin Alcohol;
- Con Biguanida Polimérica;
- Tensioactivo no iónico;
- Cuaternario de amoniaco de 5<sup>a</sup> generación;
- Sin enjuague;
- Sin colorantes;
- Sin perfume;
- No corrosivo;
- No inflamable.



## Atomic Ready está indicado para superficies fijas y elementos no críticos:

Oxímetro, Tensiómetro, Fonendoscopios, Termómetros, Almotolias, Urinarios, Baldes, Palanganas, Botellas de Diuresis, entre otros.



*Oxímetro*



*Fonendoscopios*



*Tensiómetro*



*Termómetro*



*Urinarios*



*Almotolia*

## Modo de uso:

Para limpiar y desinfectar superficies fijas, aplicar Atomic Ready directamente sobre la zona mediante una botella rociadora, pulverizador o un paño limpio humedecido con el producto.

Para la limpieza y desinfección de artículos no críticos, lavar con Atomic Ready, dejar actuar 2 minutos, si es necesario enjuagar y secar los artículos.

Durante la manipulación del producto, recomendamos el uso de EPP.

