

Detergente neutro biodegradable para uso hospitalario



Detergente neutro concentrado con alto poder de limpieza y excelente acción desengrasante, proporcionando una limpieza rápida y eficaz en la eliminación de la materia orgánica.



Dermatológicamente
comprobado



No corrosivo



Biodegradable



Alto Rendimiento



Ideal para la limpieza
superficies fijas, instrumental
quirúrgico y artículos
medico-odontologicos-hospitalarios

Detergente Neutro

Para la limpieza de superficies fijas, instrumentos quirúrgicos y artículos médico-odontológicos-hospitalarios



- Alto poder de limpieza
- Acción desengrasante
- Surfactante no iónico
- No corrosivo



No corrosivo

Puede usarse con acero inoxidable, aluminio, acero inoxidable quirúrgico, polipropileno acrílico, polietileno, vidrio y otras superficies lavables, sin causar sequedad en superficies de goma.

Modo de uso:

Preparar la solución de limpieza con Atomic DN-ULTRA, con agua a temperatura ambiente, según el grado de suciedad.

Para una limpieza profunda, diluya 250 mL en 1 litro de agua (250 mL/L). Para una limpieza media, diluya 20mL en 1 litro de agua (20mL/L). para una limpieza ligera, diluya 10 mL en 1 litro de agua (10 mL/L).

La solución con Atomic DN-ULTRA se puede aplicar directamente sobre la superficie, utilizando una esponja o fibra no abrasiva. Dejar actuar unos minutos y, si es necesario, frotar. Cuando sea posible, deje los elementos y utensilios sumergidos en la solución del producto diluido. Enjuague con agua corriente.

