

ATOMIC BRILHO DETERGENTE ÁCIDO CONCENTRADO

Revitaliza los instrumentales

Elimina manchas y previene el oscurecimiento y oxidaciones



Indicado para utilizar en los materiales previamente ya limpios.



Posee finalidad de restaurar el brillo.



Retira suciedades minerales y puntos de oxidación encontrados en vidrierías, cremalleras e instrumentales quirúrgicos fabricados en acero inoxidable.



Utilizado para neutralizar y alcalinidad residual ocasionada por el uso de detergentes alcalinos en el reprocesamiento de estos instrumentales.

**PRODUCTO DE
ASISTENCIA A
LA SALUD**



ATOMIC BRILHO DETERGENTE ÁCIDO CONCENTRADO

Durante la manipulación

Antes de iniciar el uso, evalúe el tipo de material en el cual el producto será aplicado, en relación a:

- Reactividad;
- Resistencia

- Compatibilidad química de cada material.
- Los instrumentales deben estar previamente limpios antes de sumergirse en la solución.
- Para manchas más resistentes, como placas minerales u oxidaciones, cepillar el instrumental con cepillo suave (**no utilizar escoba metálica de cerdas duras**).
- En seguida, enjuagar con agua en abundancia, eliminando completamente los residuos de canales y ranuras de los instrumentales y secar

MODO DE USAR

		
Proceso manual a temperatura ambiente	Diluir 50 mL del producto por cada litro de agua	Mantener los instrumentales sumergidos durante 20 minutos
Proceso manual y automatizado a temperatura caliente (60.°C a 80.°C)	Diluir 50 mL del producto por cada litro de agua	Mantener los instrumentales sumergidos durante 10 minutos
Luego de la limpieza de los instrumentales con detergente alcalino	Diluir 4 mL del producto para cada litro de agua en temperatura ambiente o caliente (60.°C a 80.°C)	Mantener la circulación de la solución/ mantener los instrumentales sumergidos durante 2 a 5 minutos y enjuagar con agua en abundancia y secar



Mejora el desempeño de las articulaciones



Prolonga la vida útil de los productos para la salud (PPS)



Alto rendimiento

