

ATOMIC BRILHO DETERGENTE ÁCIDO CONCENTRADO

Revitaliza os instrumentos

Remove manchas e previne o escurecimento e oxidações



PRODUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE



Indicado para ser usado nos materiais já previamente limpos.



Possui finalidade de restaurar o brilho.



Remove sujidades minerais e pontos de oxidação encontrados em vidrarias, cremalheiras e instrumentais cirúrgicos fabricados em aço inoxidável.



Utilizado para neutralizar a alcalinidade residual ocasionada pelo uso de detergentes alcalinos no reprocessamento destes instrumentais.



Dioxide

Desenvolvendo Química Sustentável

www.dioxide.com.br

  [dioxideindustriaquimica](https://www.instagram.com/dioxideindustriaquimica)

ATOMIC BRILHO DETERGENTE ÁCIDO CONCENTRADO

Durante o manuseio

Antes de iniciar o uso, avalie o tipo de material no qual o produto será aplicado, em relação à:

- Reatividade;
- Resistência
- Compatibilidade química de cada material.
- Os instrumentais devem estar previamente limpos antes de serem imersos na solução.
- Para manchas mais resistentes, como placas minerais ou oxidações, escovar o instrumental com escova macia (*não utilizar escova metálica de cerdas duras*).
- Em seguida, enxaguar com água em abundância, eliminando completamente os resíduos de canais e fendas dos instrumentais e secar.

MODO DE USAR

		
Processo manual à temperatura ambiente	Diluir 50 mL do produto para cada litro de água	Manter os instrumentos submersos por 20 minutos
Processo manual e automatizado à temperatura aquecida (60°C a 80°C)	Diluir 50 mL do produto para cada litro de água	Manter os instrumentos submersos por 10 minutos
Após a limpeza dos instrumentais com detergente alcalino	Diluir 4 mL do produto para cada litro de água em temperatura ambiente ou aquecido (60°C a 80°C)	Manter a circulação da solução/ manter os instrumentos submersos por 2 a 5 minutos e enxaguar com água em abundância e secar



Melhora o desempenho das articulações



Prolonga a vida útil dos produtos para a saúde (PPS)



Alto rendimento



Produto saneante notificado na ANVISA, nº 25351.329601/2023-47
 Responsável Técnico: Tatiane Cristina da Silva - CRQ/SP: 04476720

DIOXIDE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
 Avenida Vitória Rossi Martini, 641 - CEP:13347-613
 Distrito Industrial Vitória Martini - Indaiatuba/SP
 SAC (19) 3936-1501 - www.dioxide.com.br
 Em caso de emergência, ligue para CEATOX: 0800-722-8001