




O Atomic ENZ+ é um detergente enzimático composto por cinco enzimas e mistura de tensoativos não-iônicos que confere ao Atomic ENZ+ eficácia de rápida ação na remoção de matéria orgânica



FINALIDADE

Indicado para limpeza manual e automatizada de artigos e instrumentais cirúrgicos, dispositivos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais.

O Atomic Enz+ contém **CINCO ENZIMAS**, cada uma com ação específica.

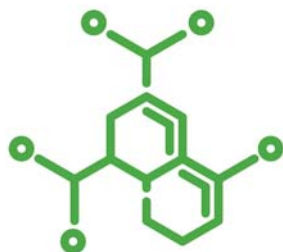

- **PROTEASE** – atua principalmente na degradação do sangue;
 - **LIPASE** – atua na degradação de gorduras;
 - **AMILASE**
 - **MANANASE**
 - **CELULASE**
- atua na degradação de componentes do bolo alimentar;

CARACTERÍSTICAS

Atividade Proteolítica mínima: 0,0864 UP.mL-1.min-1

Atividade Amilolítica mínima: 0,0523 UA.mL-1.min-1

Faixa pH puro: 6,5 a 8,5

Inflamabilidade: Líquido não inflamável

Corrosividade: Produto não corrosivo para aço cirúrgico, aço inox, acrílico, borracha, cobre, polietileno e polipropileno.

Irritabilidade: Não irritante

PRODUTO BIODEGRADÁVEL



MODO DE USO

Processo manual: Diluir o Atomic ENZ+ na proporção de 1 ml do produto para cada 1 litro de água, mergulhar os artigos deixando agir por no mínimo 5 minutos e enxaguar com água em abundância. Para melhores resultados indica-se a utilização de água quente até 55°C.

Processo Automatizado: Programar equipamento de limpeza automatizada com diluição do Atomic ENZ+ na proporção de 1 ml do produto para cada 1 litro de água. Para melhores resultados indica-se a utilização de água quente até 55°C.

COMPOSIÇÃO

Protease, lipase, mananase, celulase, estabilizantes, agente regulador de pH, coadjuvante, mistura de tensoativos não-iônicos, fragrância, conservante e veículo.

RECOMENDAÇÕES QUANTO À QUALIDADE DA ÁGUA

pH 6,0 a 9,0; condutividade máxima: 200 µS/cm; Dureza máxima: 500 mg/L CaCO₃.



Produto Registrado na ANVISA, nº 362940006

DIOXIDE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
Avenida Vitória Rossi Martini, 641 - CEP:13347-613
Distrito Industrial Vitória Martini - Indaiatuba/SP
SAC (19) 3936-1501 - www.dioxide.com.br
Em caso de emergência, ligue para
CEATOX: 0800-722-6001