



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN AMBIENTES SANITARIOS

Detergente y Disinfectante 2 en 1

Para superficies fijas
y elementos no críticos

Biguanida polimérica
de quinta generación
y amonio cuaternario



Modelo de bidón de 5 l

Sprayer Model 750mL



PREPARADO PARA USAR



ACCIÓN RÁPIDA



BIODEGRADABLE



ECONÓMICO

ACCIÓN RÁPIDA EN

2 min

- **Superfungus:**
 - Candida auris
- **Bacterias gramnegativas:**
 - Escherichia coli
 - Salmonella choleraesuis
 - Pseudomonas aeruginosa
 - Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC)
 - Acinetobacter baumannii
- **Bacterias grampositivas:**
 - Enterococcus hirae
 - Staphylococcus aureus
 - Staphylococcus aureus MRSA
 - Enterococcus faecalis VRE



Características

- pH neutro
- Sin alcohol
- Biguanida polimérica (2000 ppm)
- Surfactante no iónico
- Amonio cuaternario de quinta generación (3000 ppm)
- Sin colorantes
- Sin fragancias
- No corrosivo
- No inflamable



Atomic Ready se recomienda para superficies fijas y elementos no críticos:

Oxímetros, Brazaletes de Presión Arterial, Estetoscopios, Termómetros, Aceiteras, Chatas, Cubos, Palanganas, Frascos para Diuresis, entre otros.



Oxímetros



Estetoscopios



Brazaletes de Presión Arterial



Termómetros



Calentador de Cama



Engrasador

Cómo utilizar:

Para limpiar y desinfectar superficies fijas, aplicar Atomic Ready directamente sobre la zona mediante un atomizador, pulverizador o un paño limpio humedecido con el producto.

Para limpiar y desinfectar artículos no críticos, lavar con Atomic Ready, dejar actuar 2 minutos, si es necesario, enjuagar y secar los artículos.

En la manipulación del producto recomendamos el uso de EPI.

