



DETERGENTE ÁCIDO CONCENTRADO ATOMIC SHINE



Revitaliza los instrumentos

Elimina las manchas y previene el oscurecimiento y la oxidación.

PRODUCTO DE SALUD



Recomendado para usar en materiales previamente limpiados.



Su finalidad es devolverle el brillo.



Elimina la suciedad mineral y las manchas de oxidación encontradas en cristalería, rejillas e instrumentos quirúrgicos fabricados en acero inoxidable.



Se utiliza para neutralizar la alcalinidad residual causada por el uso de detergentes alcalinos en el reprocesamiento de estos instrumentos.





DETERGENTE ÁCIDO CONCENTRADO ATOMIC SHINE



Durante la manipulación

Antes de comenzar a utilizar, evaluar el tipo de material sobre el que se aplicará el producto, en relación a:

- Reactividad;
- Resistencia;
- Compatibilidad química de cada material;
- Los instrumentos deben ser limpiados previamente

- antes de ser sumergidos en la solución;
- Para manchas más resistentes, como placas minerales u oxidación, cepillar los instrumentos con un cepillo suave (no utilizar un cepillo metálico con cerdas duras);
- Luego enjuagar con abundante agua, eliminando totalmente los residuos de los canales y hendiduras de los instrumentos y secar.

CÓMO USARLO

		
Proceso manual a temperatura ambiente	Diluir 50 mL del producto por cada litro de agua	Mantener los instrumentos sumergidos durante 20 minutos.
Proceso manual y automatizado a temperatura calentada (60°C a 80°C)	Diluir 50 mL del producto por cada litro de agua	Mantener los instrumentos sumergidos durante 10 minutos.
Después de limpiar los instrumentos con detergente alcalino	Diluir 4 mL del producto por cada litro de agua a temperatura ambiente o calentada (60°C a 80°C)	Mantener la solución circulando/mantener los instrumentos sumergidos durante 2 a 5 minutos y enjuagar con abundante agua y secar.



Mejora el rendimiento articular



Prolonga la vida útil de los productos sanitarios (PPS)



Rendimiento alto



Dioxide

Desarrollando Química Sostenible

Producto desinfectante notificado a ANVISA, n° 25351.329601/2023-47

Responsable Técnico: Tatiane Cristina da Silva - CRQ/SP: 04476720

Av. Vitória Rossi Martini, 641 - Indaiatuba - SP

CEP 13347-613 - Tel: (19) 3116-7400 - SAC (19) 3936-1501

www.dioxide.com.br

  @dioxideindustriaquimica

