



## ATOMIC BRILHO DETERGENTE ÁCIDO CONCENTRADO



### Revitaliza os instrumentos

Remove manchas e previne o escurecimento e oxidações

PRODUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE



Indicado para ser usado nos materiais já previamente limpos.



Possui finalidade de restaurar o brilho.



Remove sujidades minerais e pontos de oxidação encontrados em vidrarias, cremalheiras e instrumentais cirúrgicos fabricados em aço inoxidável.



Utilizado para neutralizar a alcalinidade residual ocasionada pelo uso de detergentes alcalinos no reprocessamento destes instrumentais.





## ATOMIC BRILHO DETERGENTE ÁCIDO CONCENTRADO



### Durante o manuseio

**Antes de iniciar o uso, avalie o tipo de material no qual o produto será aplicado, em relação à:**

- Reatividade;
- Resistência;
- Compatibilidade química de cada material;
- Os instrumentais devem estar previamente limpos antes de serem imersos na solução;
- Para manchas mais resistentes, como placas minerais ou oxidações, escovar o instrumental com escova macia (*não utilizar escova metálica de cerdas duras*);
- Em seguida, enxaguar com água em abundância, eliminando completamente os resíduos de canais e fendas dos instrumentais e secar.

### MODO DE USAR

|  |                |    |
|--|--|--|
| <b>Processo manual à temperatura ambiente</b>                                      | Diluir 50 mL do produto para cada litro de água  | Manter os instrumentos submersos por 20 minutos  |
| <b>Processo manual e automatizado à temperatura aquecida (60°C a 80°C)</b>         | Diluir 50 mL do produto para cada litro de água  | Manter os instrumentos submersos por 10 minutos  |
| <b>Após a limpeza dos instrumentais com detergente alcalino</b>                    | Diluir 4 mL do produto para cada litro de água em temperatura ambiente ou aquecido (60°C a 80°C) | Manter a circulação da solução/ manter os instrumentos submersos por 2 a 5 minutos e enxaguar com água em abundância e secar |



Melhora o desempenho das articulações



Prolonga a vida útil dos produtos para a saúde (PPS)



Alto rendimento



**Dioxide**

Desenvolvendo Química Sustentável

Produto saneante notificado na ANVISA, Nº 25351.329601/2023-47  
Responsável Técnico: Tatiane Cristina da Silva - CRQ/SP: 04476720

Av. Vitória Rossi Martini, 641 - Indaiatuba - SP

CEP 13347-613 - Tel: (19) 3116-7400 - SAC (19) 3936-1501

Em caso de emergência, ligue para CEATOX: 0800 014 8110

[www.dioxide.com.br](http://www.dioxide.com.br)

@dioxideindustriaquimica

