



Detergente neutro biodegradable para uso hospitalario

Detergente neutro concentrado con alto poder de limpieza y excelente acción desengrasante, proporcionando una limpieza rápida y eficaz en la eliminación de materia orgánica.



Dermatológicamente probado



No corrosivo



Biodegradable



Rendimiento alto



Ideal para la limpieza de superficies fijas, instrumentos quirúrgicos y artículos odontológicos-médicos-hospitalarios



Detergente neutro

Para la limpieza de superficies fijas, instrumental quirúrgico y artículos odontológicos-médicos-hospitalarios.

- Alto poder de limpieza
- Acción desengrasante
- Tensoactivo no iónico
- No corrosivo



No corrosivo

Se puede utilizar de forma segura en acero inoxidable, aluminio, acero quirúrgico, acrílico, polipropileno, polietileno, vidrio y otras superficies lavables. No reseca las superficies de goma.

Cómo utilizar

Preparar la solución limpiadora con Atomic DN-ULTRA, con agua a temperatura ambiente, según el nivel de suciedad.

Para limpiezas intensas, diluir 250mL en 1 litro de agua (250mL/L). Para limpiezas medias, diluir 20mL en 1 litro de agua (20mL/L). Para limpiezas ligeras, diluir 10mL en 1 litro de agua (10mL/L).

La solución con Atomic DN-ULTRA se puede aplicar directamente sobre la superficie, utilizando una esponja o fibra no abrasiva. Dejar actuar unos minutos y, si es necesario, frotar. Cuando sea posible, dejar los elementos y utensilios sumergidos en la solución diluida del producto. Enjuagar con agua corriente.

