



Detergente Neutro biodegradável para uso hospitalar

Detergente neutro concentrado com alto poder de limpeza e excelente ação desengordurante, proporcionando limpeza rápida e eficaz na remoção de matéria orgânica.



Dermatologicamente
testado



Não corrosivo



Biodegradável



Alto rendimento



Ideal para limpeza de
superfícies fixas, instrumental
cirúrgico e artigos
odonto-médico-hospitalares



Dioxide

Desenvolvendo Química Sustentável

@dioxideindustriaquimica





Detergente Neutro

Para limpeza de superfícies fixas, instrumentais cirúrgicos e artigos odonto-médico-hospitalares

- Alto poder de limpeza
- Ação desengordurante
- Tensoativo não iônico
- Não corrosivo



Não corrosivo

Pode ser usado com segurança em inox, alumínio, aço cirúrgico, acrílico, polipropileno, polietileno, vidro e outras superfícies laváveis. Não causa ressecamento em superfícies emborrachadas.

Modo de usar

Preparar a solução de limpeza com o Atomic DN-ULTRA, com água a temperatura ambiente, conforme o grau de sujeira existente.

Para limpeza pesada, diluir 250mL para 1 litro de água (250mL/L). Para limpeza média, diluir 20mL para 1 litro de água (20mL/L). Para limpeza leve, diluir 10mL para 1 litro de água (10mL/L).

A solução com Atomic DN-ULTRA pode ser aplicada diretamente sobre a superfície, com o auxílio, de uma esponja ou fibra não abrasiva. Deixar agir por alguns minutos e, se necessário, esfregar. Quando possível, deixar os artigos e utensílios imersos na solução do produto diluído. Enxaguar em água corrente.

